



W RYTMIE TWOJEGO ŻYWIÓŁU

Indywidualna
orteza na kolano



TO JEST WYRÓB MEDYCZNY. UŻYWAJ GO ZGODNIE
Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.



Powietrze




Problem i skala zjawiska

Ból kolan to codzienność dla milionów ludzi na całym świecie.

Problemy z kolanem, takie jak zwyrodnienie stawu kolanowego (gonartroza), szpotawość, koślawość kolana czy okres po artroskopii, to jedne z najczęstszych przyczyn bólu i ograniczenia ruchomości. Ich rozwój wiąże się m.in. z przebytymi urazami, przeciążeniami, wadami osi kończyny, nadwagą oraz wiekiem.

Czy wiesz że?

- 22,9% osób powyżej 40. roku życia doświadcza objawów gonartrozy.
- U co trzeciej osoby po urazie ACL rozwijają się zmiany zwyrodnieniowe w ciągu 10 lat.
- Stosowanie ortezy może ograniczyć lub wyeliminować konieczność stosowania leków przeciwbólowych u większości pacjentów.
- Całkowita redukcja zapotrzebowania na leki przeciwbólowe występuje u ok. 22% pacjentów, a ograniczenie ich stosowania – u 54%. *

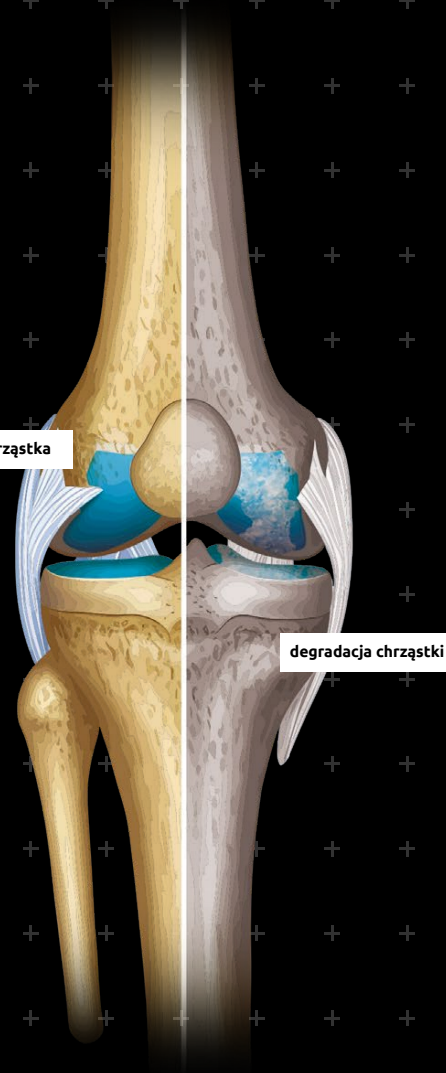

Poznaj ortezę JointCraft 3D

Jest nowoczesnym rozwiązaniem zapewniającym stabilizację stawu kolanowego. Dostępna jest w trzech wersjach:



CUSTOM Refundacja NFZ (H03.04 i H03.05, limit 1000 zł)

Postęp technologiczny otwiera nowe możliwości w medycynie i rehabilitacji. Specjalistyczne oprogramowanie pozwala na szybkie przygotowanie indywidualnie dopasowanego projektu ortozy 3D, przeznaczonej do druku w technologii 3D. Zastosowanie mobilnego skanera umożliwia przesłanie precyzyjnego modelu kończyny pacjenta bezpośrednio do działu projektowego. Eliminuje to zbędne przestoje, skraca czas realizacji zamówienia i redukuje konieczność dodatkowych wizyt.



SERYJNA Refundacja NFZ (H03.04, limit 1000 zł)

Dostępna w kilku standardowych rozmiarach (S do XL), dopasowanych do obwodów kończyny dolnej. Umożliwia natychmiastowe zaopatrzenie pacjentów o typowej budowie.



ORTEZA OA Refundacja NFZ (H03.05, limit 1000 zł)


Orteza OA umożliwia korekcję osi kończyny na podstawie skanu nogi, co prowadzi do odciążenia przedziału przyśrodkowego lub bocznego stawu kolanowego.

Rozmiar	S	M	L	XL
Obwód uda (cm)	39 - 47	47 - 53	53 - 59	59 - 67
Obwód kolana (cm)	33 - 35	35 - 38	38 - 43	43 - 48
Obwód łydki (cm)	30 - 35	35 - 40	40 - 47	47 - 50

Pomiar obwodu uda – 15 cm powyżej środka rzepki

Pomiar obwodu kolana – na wysokości środka rzepki

Pomiar obwodu łydki – 15 cm poniżej środka rzepki

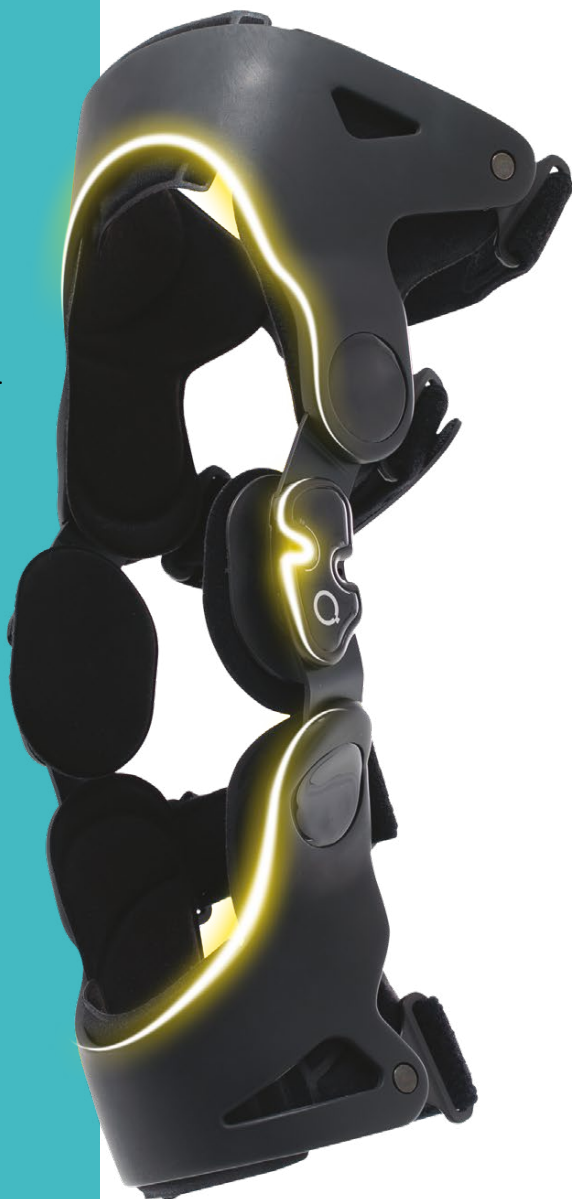

Cechy orety



Konstrukcja z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem węglowym



Płaski, opatentowany zawias czteroosiowy odwzorowujący naturalny ruch kolana. Możliwość ograniczenia zakresu ruchu w wyproście (10°, 20°, 30°) i zgięciu (10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 90°) oraz unieruchomienia w 0°



Wygodne paski z uchwytami ułatwiającymi zakładanie



Antypoślizgowa tapicerka



Elementy wykonane z materiałów nierdzewnych

Zastosowanie:



Orteza przeznaczona dla osób z niestabilnością stawu kolanowego różnej etiologii, stosowana w przypadku uszkodzeń więzadeł ACL, PCL, MCL, LCL, jak również jako forma leczenia zachowawczego wśród pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego, pomaga w procesie rehabilitacji po zabiegu i powrocie do pełnej sprawności.

Technologia i zalety

Ból kolan to codzienność dla milionów ludzi na całym świecie.

JointCraft 3D powstaje dzięki technologii druku 3D z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem węglowym. Lekka, precyzyjna struktura staje się solidnym wsparciem w ruchu – dokładnie tam, gdzie tego potrzebujesz.

Waga ortezy to ~500 g.

Pacjenci biorący udział w badaniu zgłaszali istotny spadek dolegliwości bólowych oraz poprawę funkcji stawu.

Spersonalizowane rozwiązania ortotyczne w praktyce klinicznej

Dotychczasowe wyniki badań z udziałem pacjentów korzystających z ortezy Jointcraft 3D są obiecujące.

Dane zebrane od 22 pacjentów po sześciu miesiącach obserwacji potwierdzają wysoki poziom satysfakcji użytkowników.

Pacjenci podkreślają:

- poprawę stabilności stawu kolanowego
- idealne dopasowanie anatomiczne
- łatwość zakładania i zdejmowania ortezy
- nowoczesny, estetyczny design

Co więcej, stosowanie ortezy przyczyniło się do zwiększenia aktywności fizycznej, co dowodzi ich nie tylko funkcjonalnych, ale również motywacyjnych zalet w codziennym życiu. Obserwowane trendy dają solidne podstawy, by stwierdzić, że ortezy **JointCraft 3D** stanowią skuteczne, bezpieczne rozwiązanie, które realnie wspiera proces rehabilitacji i poprawia jakość życia pacjentów.



Ziemia





Ogień



Funkcjonalności I personalizacja

Kluczowe funkcje ortezy JointCraft 3D:

- Ochrona przysródkowego i bocznego przedziału stawu kolanowego
- Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa podczas rehabilitacji i codziennych aktywności
- Precyzyjne dopasowanie ortezy w wersji Custom dzięki skanowi 3D
- Szeroka gama rozmiarów w wersji seryjnej

Wygląd, który odzwierciedla Twój żywioł!

Kolor:


Czarny mat

Czerwony mat

Hydrografika:




Powietrze

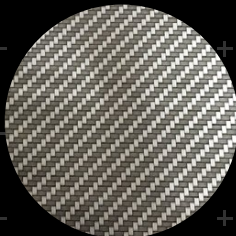

Ziemia



Ogień

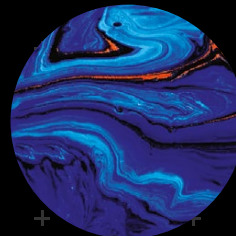


Woda

Kompleksowe wsparcie pacjenta

Więcej niż tylko produkt.

Łączymy zaawansowaną technologię z indywidualnym podejściem do pacjenta. Dbamy o każdy etap procesu
➔ od pomiaru po dostarczenie ortezы gotowej do działania.


- Mobilny skan - możliwy do wykonania nawet w niewielkiej przestrzeni
- Brak jednorazowych form to mniej odpadów produkcyjnych
- Realizacja Ortezy w 2-3 tygodnie
- Aplikacja Qmed Play z ćwiczeniami wzmacniającymi mięśnie
- Refundacja NFZ

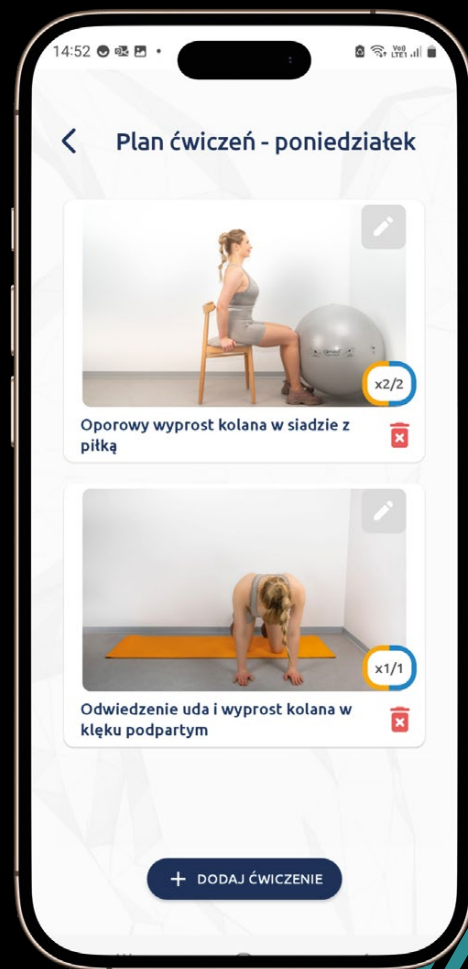



Woda



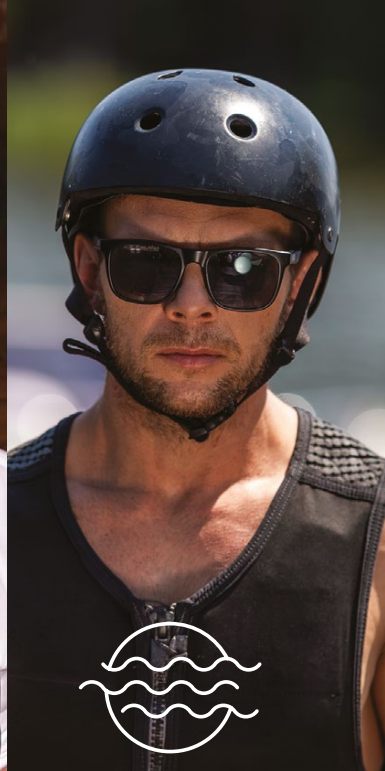

A Ty który żywioł wybierasz?

Qmed[®]
by MEYRA



Katalog online

MDH[®]
Part of MEYRA GROUP

Skontaktuj się z nami:

tel.: 42/636 81 44

lub odwiedź nas online na:

www.jointcraft.pl

Producent i podmiot prowadzący
reklamę wyrobu medycznego:

mdh Sp. z o.o.,

ul. Maratońska 104, 94-007 Łódź

CE

Nr. wyd.: 09.2025